

MÁSCARA DE PROTECCIÓN FACIAL

MODELO MPF-300



CÓMODAS, LIVIANAS Y REUTILIZABLES

COBERTURA SUPERIOR Y FRONTAL

Protege ojos, nariz y boca. Permite el uso de lentes y barbijo.

REUTILIZABLE

Sanitizable con agua clorada y/o alcohol.

REFORZADA

Visera compacta, visor cristalino.

Cómoda y liviana.

Contenido

- 1 Placa visor de PET 300 micrones, ultra cristalino.
- 1 Vincha de PVC liso, sin poros, para protección superior.
- 3 Broches clip de presión.
- 2 Bandas elásticas.
- 1 Nuquera flexible de PVC ranurada para un fácil ajuste a medida.



**Entregas en CABA
y GBA SIN CARGO***


(*A partir de 100 unidades)



Recomendaciones de Armado


1 Sanitizá.

El embalaje y su contenido.
Lavá y enjuagá bien tus
manos.

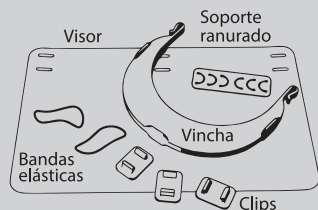


2 Armá tu máscara.

Quitá las protecciones
del visor frontal y fijala a
la vincha usando los clips.

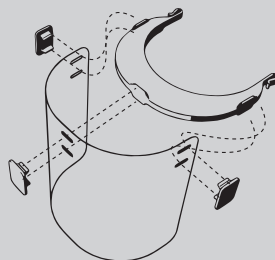

3 Ajustala.

Usá las bandas elásticas y
el soporte ranurado para
ajustarla a tu medida.
Tiene que quedarte firme
y cómoda.

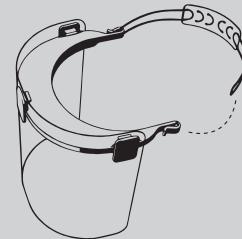

Cuidado al quitarla, que su parte exterior no toque tus ojos, nariz o boca. Sanitizá con agua clorada y/o alcohol periódicamente.



ventas@intelektron.com



Consultas y Pedidos:
(11) 2205-9000



www.intelektron.com